


INSTRUKCJA OBSŁUGI – LANAFORM FOOT TAPPING

Dziękujemy że wybraliście państwo urządzenie Foot Tapping firmy Lanaform. Urządzenie to służy do stymulacji cyrkulacji krwi, relaksacji mięśni i usuwaniu chronicznego zmęczenia.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Proszę upewnić się, że urządzenie będzie używane w bezpiecznym miejscu.

Proszę zapoznać się z instrukcją!

Nazwy i funkcje poszczególnych części

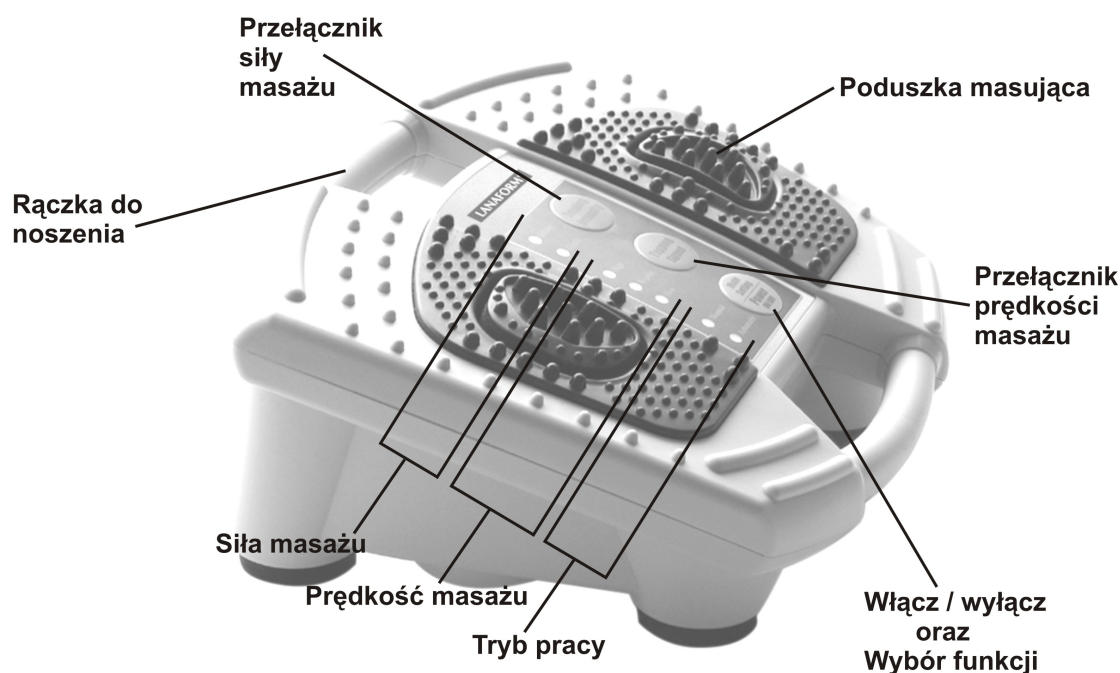

Instrukcja użytkowania

Uwaga: urządzenie może zakłócać obraz telewizyjny.

1. Należy umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni i włączyć wtyczkę do sieci. Należy upewnić się, że przełącznik On/Off – Mode działa prawidłowo.
2. W pozycji siedzącej można położyć poduszki na obszarze, który jest zmęczony np. środek stóp.
3. Wcisnąć przycisk On/Off – Mode. Lampka zapali się automatycznie. Timer zostanie aktywowany w momencie włączenia urządzenia. Po zakończeniu użytkowania urządzenie wyłączy się w ciągu 15 minut.
4. Po wciśnięciu przycisku On/Off – Mode funkcje wybrane są sukcesywnie: wyłączenie – funkcja automatyczna – funkcja manualna – włączenie.
5. Po wyborze funkcji manualnej przez wciśnięcie przycisku On/Off – Mode zaświecą się lampki prędkości i siły masażu. Należy wcisnąć przyciski prędkości i siły masażu w celu zwiększenia intensywności tych funkcji. Aby zwiększyć siłę masażu – przyciśnięcie przycisku powoduje zmianę wskaźnika między High i Low. Aby zwiększyć prędkość masażu – przyciśnięcie przycisku powoduje zmianę wskaźnika między High, Normal i

Slow.

6. Timer uaktywnia się kiedy urządzenie jest włączone. Utrzymuje pracę przez 15 minut. Jeśli urządzenie zostanie zatrzymane w czasie sesji należy wcisnąć przycisk On/Off – Mode i wyłączyć lampkę funkcji. W przypadku przyciśnięcia On/off – Mode urządzenie będzie przełączać się między funkcjami: wyłączenie – funkcja automatyczna – funkcja manualna – włączenie.
7. Wyłączyć urządzenie.

Funkcja automatyczna: modyfikuje rytm, siłę masażu, prędkość masażu – w sposób automatyczny. Nie można nic zmieniać w sposób ręczny.

Funkcja manualna: siła masażu i prędkość masażu modyfikowane są ręcznie.

Uwaga:

- nie wolno blokować mechanizmu masującego np. przez zbyt silne przyciśnięcie poduszek masujących,
- nie wolno używać poduszek dłużej niż 15 minut. W przypadku kontynuacji masażu, należy odczekać 30 min,
- powtarzane i zbyt intensywne użytkowanie urządzenia może powodować wzrost temperatury wewnętrznej, co spowoduje włączenie się mechanizmu zatrzymującego. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie z gniazdka i odczekać godzinę przed ponownym użyciem. Jeśli urządzenie pozostanie włączone i masaż zostanie załączony ponownie – groźba niebezpieczeństwa,

Przechowywanie i utrzymanie

Czyszczenie: Wyłączyć urządzenie z sieci. W przeciwnym razie można doznać szoku elektrycznego. Nie wolno polewać urządzenia wodą. Urządzenie zawiera komponenty elektryczne i może to powodować wypadek lub zniszczenie urządzenia.

Aby wyczyścić zewnętrzną obudowę urządzenia należy przetrzeć ją miękką szmatką z łagodnym detergentem wymieszany z wodą.

Nie wolno używać rozpuszczalników, benzenu, sprayów.

Używać wełny do usuwania kurzu z powierzchni poduszek.

Przechowywanie: urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci. Aby uniknąć awarii nie wolno owijać urządzenia kablem. Nie wieszać urządzenia za kabel.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Tak jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego także używając masażera Tonic Mass należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

- należy sprawdzać czy napięcie w sieci odpowiada temu, którego wymaga urządzenie

- urządzenie zostało zaprojektowane do pracy przez krótki okres.
- nie wolno zostawiać poduszek masujących bez nadzoru w czasie kiedy są włączone
- kobiety w ciąży, osoby z zakrzepami, osoby, u których występują niezdiagnozowane bóle ciała, oraz osoby z rozrusznikiem serca nie mogą używać masażera bez porady z lekarzem
- szczególna uwaga jest niezbędna w przypadku użytkowania urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne
- zawsze należy trzymać urządzenie z dala od dzieci
- nigdy nie używać urządzenia jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone
- nie wolno siadać na pilocie, lub umieszczać go między ciałem a urządzeniem masującym
- tak jak w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych nie należy używać masażera w czasie burzy
- nie wolno używać masażera w pobliżu wanny, zlewu lub innych obszarów gdzie może dojść do kontaktu z wodą
- nigdy nie należy zanurzać poduszek masujących w wodzie
- kabel elektryczny powinien być utrzymany w czystości, z daleka od urządzeń grzewczych lub tnących
- nie wolno używać poduszek masujących w czasie snu
- nie wolno używać poduszek masujących w miejscu gdzie używane były aerozole
- nie należy używać masażera pod przykryciem, ponieważ urządzenie może się przegrzać
- nigdy nie należy nosić urządzenia za kabel elektryczny
- przed otwarciem poduszek masujących należy upewnić się, że są wyłączone z sieci
- masażera można używać tylko w celach do których został zaprojektowany.

Uwaga: wszystkie naprawy muszą być dokonywane w serwisie firmy LANAFORM.

<i>Objawy</i>	<i>Co sprawdzić?</i>	<i>Co zrobić?</i>
Nie ma ruchu	Czy urządzenie jest włączone?	Włączyć urządzenie do sieci.
	Czy elektryczność jest włączona?	Włączyć elektryczność.
	Czy kabel jest uszkodzony?	Skontaktować się ze sprzedawcą.
Ruch masujący zatrzymuje się w czasie pracy.	Czy urządzenie działa dłużej niż 15 min.?	Wewnętrzny timer automatycznie wyłącza urządzenie po 15 minutach użytkowania.
Zatrzymanie ruchu masującego.	Czy stopy nie naciskają zbyt mocno na urządzenie?	W przypadku zbyt dużej presji na poduszki wzrasta wewnętrzna temperatura. Wewnętrzny mechanizm bezpieczeństwa wyłącza urządzenie.
Urządzenie jest uszkodzone.		Odesłać do serwisu.

Gwarancja

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupu towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanymi urządzeniami oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem, oznaczonym datą i pieczęcią punktu sprzedaży oraz dowodem zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....
Podpis Klienta