

●Hot & Cold Mass – Lanaform

Dziękujemy za wybór urządzenia Hot & Cold Mass firmy Lanaform. Masażer wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniczne, zapewniając zimny lub ciepły masaż.


Dlaczego dobrze jest używać to urządzenie? Jego koncepcja jest wyjątkowo efektywna w szybkim odciążeniu zmęczonych mięśni i usunięciu bólu. Kombinacja ciepłego i chłodnego masażu stymuluje cyrkulację krwi w sposób znacznie szybszy od zwykłego masażu. Zmęczone, wrażliwe mięśnie dostaną dawkę relaksu właśnie dzięki temu systemowi. Urządzenie posiada pięć akcesoriów masujących, które można dowolnie wykorzystywać.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Tak jak w większości urządzeń elektrycznych, także używając masażera należy przestrzegać pewnych zasad:

- należy sprawdzić, czy napięcie w sieci wynosi 230 V
- to urządzenie zostało zaprojektowane do krótkiego użytkowania. Można go używać maksymalnie przez 20 minut. Po tym czasie należy urządzenie wyłączyć aby mogło się ochłodzić
- nie wolno zostawić masażera bez opieki kiedy jest włączony
- kobiety w ciąży, osoby z zakrzepami, osoby z niezdiagnozowanym bólem ciała, osoby z rozrusznikiem serca nie powinny używać masażera bez konsultacji z lekarzem
- szczególna uwaga wymagana jest przy użyciu masażera przez dzieci lub osoby niepełnosprawne
- urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci
- nigdy nie wolno używać masażera jeśli wtyczka czy kabel elektryczny są uszkodzone lub nie pracują prawidłowo
- tak jak w przypadku każdego innego urządzenia elektrycznego nie wolno używać masażera w czasie burzy
- nie należy używać masażera w pobliżu wanny, prysznicza czy innych obszarów gdzie może dojść do kontaktu z wodą
- nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
- kabel zasilający należy trzymać z dala od wszelkich ostrych narzędzi
- przed czyszczeniem należy urządzenie wyłączyć
- należy sprawdzić temperaturę masażera przed używaniem we wrażliwych miejscach
- nie wolno używać Mister Massa wokół oczu lub blisko wrażliwych części ciała czy obszarów zranionych
- nie wolno używać masażera w czasie snu lub bez ciągłego nadzoru
- nie wolno używać masażera w czasie użycia aerozoli lub sprejów
- nie wolno używać masażera pod przykryciem czy poduszką – może to skutkować przegrzaniem, ogniem, szokiem elektrycznym, kontuzjami użytkowników
- nigdy nie wolno nosić masażera za kabel elektryczny
- urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją

Opis urządzenia

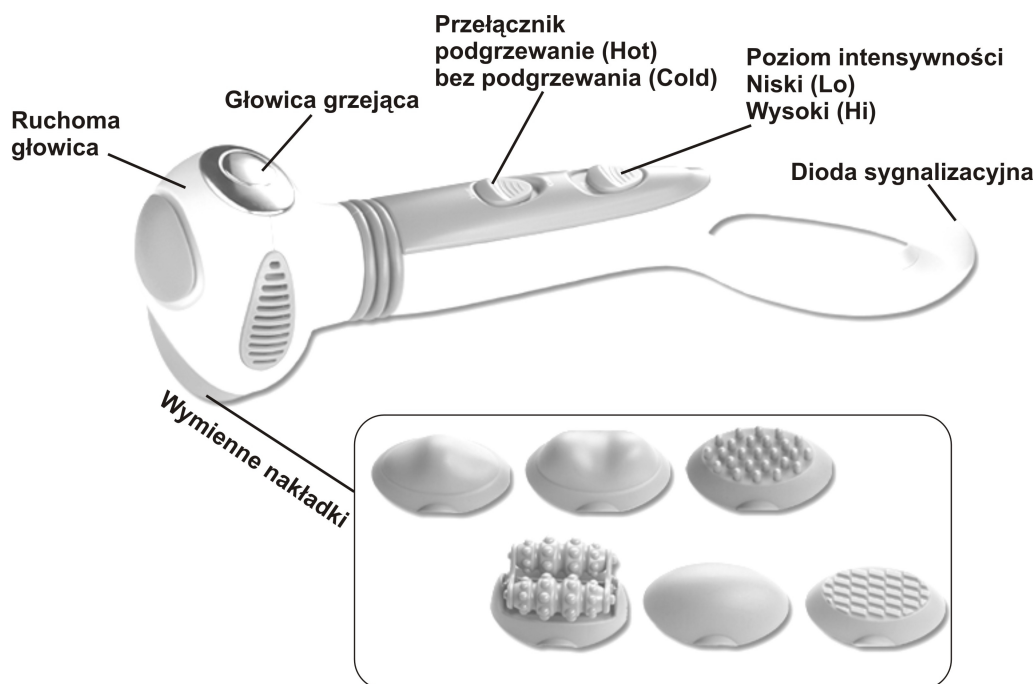

Zalecamy

W razie bólu mięśni zalecamy używać urządzenia pięć razy na dzień. Jeden cykl zawiera 5 sekund masażu chłodnego i 30 sekund ciepłego. Nie należy wykonywać więcej niż 5 cykli dziennie.

Właściwości

Urządzenie nadaje się do wielokrotnego ładowania. Kiedy bateria jest załadowana może działać przez 30 minut.

Urządzenie jest lekkie i posiada długą rączkę, dzięki której łatwiej można je nosić.

Do urządzenia dostępnych jest 6 akcesoriów.

Głowica masująca obraca się pod kątem 180 stopni.

Aby naładować masażer

Przed pierwszym użyciem masażera należy ładować baterie przez 24 godziny, aby upewnić się, że funkcjonuje prawidłowo.

Po pierwszym użyciu czas ponownego załadowania wynosi 7 godzin.

Urządzenie będzie działało przez 30 minut jeśli bateria jest w pełni naładowana.

Aby załadować baterię należy przekręcić pokrętko na pozycję „Off”. Następnie włączyć do gniazdka elektrycznego zasilacz i podłączyć drugi koniec kabla do urządzenia.

Lampka zapali się na zielono – oznacza to, że bateria się ładuje.¹

¹ Może się zdarzyć, iż pewna partia urządzeń ma diodę barwiącą się tylko na kolor czerwony. Nie jest to wada urządzenia.

Po zakończeniu ładowania – wyłączyć zasilacz.

Ponowne ładowanie może odbyć się po 20 minutach od zakończenia użytkowania urządzenia.

Sposób użytkowania

Przed włączeniem trybu masowania należy wybrać intensywność wibracji („Hi” dla dużej częstotliwości, „Lo” dla małej). Należy użyć przycisku „Hi/Lo”.

Następnie należy wcisnąć „Froid/Cold”.

Aby wybrać tryb masażu chłodnego, należy przytrzymać głowicę masującą przez 5 sekund w miejscu, które chce się masować. Przejście do trybu chłodnego zajmuje ok 15 sekund.

Następnie należy wcisnąć przycisk „Chaud/Heat”. Głowica masażera nagrzeje się do 55 stopni w ciągu 30 sekund. Następnie należy przycisnąć lekko masażer do tego samego miejsca co poprzednio i przytrzymać przez około 30 sekund.

Powtarzać cykl pięciokrotnie w tej samej strefie ciała. Rekomendujemy przeprowadzanie 5 cykli ciepło-zimno dziennie .

Podczas masażu można także używać jednego z sześciu akcesoriów dostępnych z urządzeniem.

Rekomendujemy użycie grzejącej głowicy w celu przygotowania strefy do masażu z jednym z akcesoriów.

Rekomendujemy używanie urządzenia nie dłużej niż przez 20 minut dla jednego masażu.

Należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „Off:” w momencie zakończenia masażu.

Użytkowanie akcesoriów

Akupunktura: ten dodatek daje silny, głęboki masaż zmęczonych mięśni.

Podwójny walek: masaż tym dodatkiem usprawnia krążenie krwi. W czasie jego używania należy jeździć masażerem w górę i w dół.

Delikatny masaż: może być używany na całym ciele, daje odpoczynek mięśniom.

Masaż shiatsu: ten dodatek symuluje masaż koniuszkami palców, dzięki czemu powstaje wrażenie silnego masażu dającego odpoczynek mięśniom.

Masaż zaciśniętą pięścią: symuluje masaż zaciśniętą pięścią. Masuje mięśnie głęboko, dając im odpoczynek.

Masaż gałką: ten dodatek masuje małymi gałkami dzięki czemu masaż jest dynamiczny. Służy do masażu dużych mięśni.

Utrzymanie

Czyszczenie

Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone i chłodne. Myjąc należy używać miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nigdy nie wolno dopuścić do kontaktu rączki masażera z wodą.

Przetrzywanie

Należy odłączyć urządzenie i pozwolić mu wystygnąć. Następnie włożyć do pudełka i schować w suche i czyste miejsce. Nigdy nie wolno owijać kabla wokół urządzenia. Nigdy nie należy wieszać urządzenia na kablu.

Gwarancja

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupu towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanymi urządzeniami oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem, oznaczonym datą i pieczęcią punktu sprzedaży oraz dowodem zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....
Podpis Klienta