

# LANAFORM Back Massager – masażer na fotel

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Masażer do użytku domowego oraz samochodowego.

Dziękujemy za wybór masażera Back Massager, masażera wysokiej jakości, który zapewni lata satysfakcji z użytkowania.

Back Massager został zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Składa się z 5 silniczków masujących, które masując głęboko uspokajają zmęczone mięśnie. Urządzenie można odpowiednio zaprogramować i kontrolować za pomocą pilota.

Masażer bazuje na unikalnym pomysśle, który powoduje, że bardzo łatwo jest go używać zarówno w samochodzie jak i w biurze czy domu. Lanaform zrobił wszystko aby wykorzystać najnowsze zdobycze w dziedzinie komfortu i ochrony zdrowia.

Nie należy jednak używać masażera jako urządzenia leczniczego czy medycznego.

Ból czy inne pojawiające się symptomy mogą oznakami poważnych problemów.

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zawsze przestrzegać poniższych zasad.

#### **Uwaga: aby uniknąć szoku elektrycznego:**

- zawsze wyłączyć urządzenia z sieci po użyciu i przed jego czyszczeniem.
- Nigdy nie włączaj ponownie urządzenia, które wpadło do wody. Wyłącz je natychmiast.

#### **Uwaga: Aby uniknąć poparzenia, szoku elektrycznego, pożaru i kontuzji.**

Urządzenie elektryczne nie może nigdy być pozostawione bez opieki. Należy wyłączyć je kiedy nie jest używane. Należy wzmocnić uwagę kiedy urządzenie używane jest przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Urządzenie należy używać jedynie według zaleceń instrukcji. Nie wolno używać akcesoriów nie polecanych przez firmę Lanaform lub tych które nie są dostarczone razem z urządzeniem.

Nie wolno używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, jeśli części te nie działają prawidłowo, zostały upuszczone lub wpadły do wody. W takim wypadku należy skontaktować się z serwisem.

Nigdy nie używać dodatków metalowych razem z urządzeniem.

Nie nagrzewać kabla elektrycznego.

Nie wolno używać urządzenia podczas snu.

Nigdy nie wolno dopuścić aby cokolwiek dostało się do wnętrza urządzenia.

Nie wolno używać urządzenia w pobliżu aerozoli lub źródeł tlenu.

Nigdy nie używać urządzenia pod kołdrą czy kocem. Może to spowodować pożar, wstrząs elektryczny lub osobistą kontuzję.

Nie wolno nosić urządzenia trzymając za kabel elektryczny.

Aby wyłączyć urządzenie należy najpierw wyłączyć je przyciskiem OFF, a następnie wyciągnąć wtyczkę z sieci.

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego.

Jeżeli kabel elektryczny jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowane osoby, żeby uniknąć ryzyka.

#### **Uwaga:**

Zalecamy przeczytać wszystkie zalecenia instrukcji przed rozpoczęciem używania urządzenia.  
W razie problemów ze zdrowiem należy konsultować stosowanie urządzenia z lekarzem.  
Osoby ze stymulatorem serca muszą konsultować użycie urządzenia z lekarzem.  
Nigdy nie należy zostawiać urządzenia elektrycznych bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu dzieci.  
Nigdy nie wolno przykrywać urządzeń elektrycznych kiedy są włączone.  
Nigdy nie należy używać urządzenia dłużej niż 15 min. bez przerwy.  
Zbyt intensywne użytkowanie tego urządzenia może skutkować przegrzaniem i skróceniem życia produktu. W razie przegrzania należy zaprzestać użytkowania urządzenia i odłożyć je aby mogło się schłodzić.  
Nigdy nie wolno używać urządzenia w miejscach, gdzie występują rany, kontuzje lub infekcje skóry.  
Ten produkt jest masażerem nieprofesjonalnym, który zaprojektowany został do ukojenia zmęczonych mięśni. Nie należy używać go jako substytutu zabiegów medycznych.  
Nie należy używać masażera przed snem. Masaż ma charakter stymulujący i może utrudniać zaśnięcie.  
Nigdy nie wolno używać urządzenia w łóżku.  
Ten produkt nie może być używany przez osoby cierpiące na ból, negatywnie skutkujący na działanie urządzenia.  
Urządzenie nie może być używane przez dzieci pozostawione bez opieki, przez osoby niepełnosprawne bez pomocy innych.

## Instrukcje

### System pasków


Back Massager wyposażony jest w unikalny system pasków, które pozwalają dopasować urządzenie do prawie każdego krzesła czy fotela. Wystarczy przełożyć paski przez oparcie krzesła czy siedzenia i spiąć klamrą.

### Adaptory elektryczne

Masażer może być używany w domu przy użyciu prądu 230 V lub w samochodzie -12 V (przez zapalniczkę samochodową). Adaptory są na wyposażeniu urządzenia.

### Pilot

Pilot pozwala na wybór najlepszej formy masażu przez naciśnięcie przycisku. Pilot łatwo mieści się w dłoni i zawsze jest w zasięgu. Można zmienić program bez potrzeby wstawiania czy sięgania do przycisków.

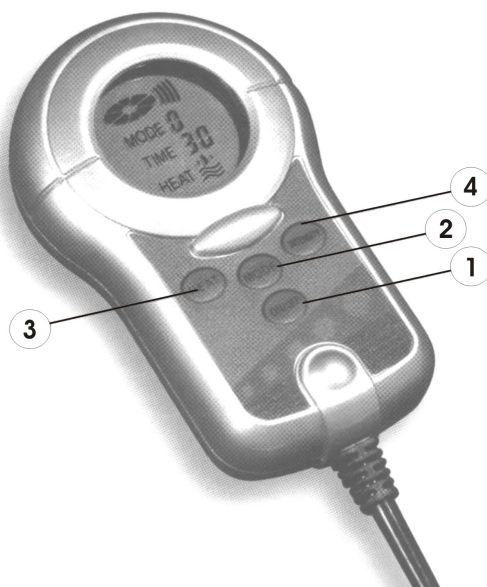

## Back Massager – opis urządzenia

1. Przycisk „ON/OFF”.  
Aby włączyć masażer, należy wcisnąć przycisk „ON/OFF”. Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk ponownie i wyświetlacz zgaśnie.
2. Aby wybrać różne rodzaje masażu.  
Przycisk trybu („MODE”) pozwala na aktywację silniczków masujących, które będą masowały odpowiednie części ciała: górną część pleców, niższą część pleców, ud. Można dostosować masaż przez wybór jednego obszaru, dwóch czy trzech jednocześnie. Aby wybrać obszar masażu należy wcisnąć przycisk trybu („MODE”). Urządzenie posiada 8 różnych trybów masażu, od 0 do 7.
3. Ogrzewanie.  
Wciskając przycisk „HEAT” włącza się przyjemne ogrzewanie. Aby wyłączyć ogrzewanie należy ponownie wcisnąć przycisk „HEAT”. Symbol <<----<< pojawi się na wyświetlaczu i będzie się wyświetlał, kiedy przycisk „HEAT” był naciśnięty.
4. Intensywność masażu.  
Możesz wybrać poziomu intensywności masażu. Back Massager posiada trzy poziomy intensywności: niski (L), średni (M), wysoki (H). Wskaźniki LED wskazują wybór użytkownika. Aby zmienić intensywność masażu, naciśnij przycisk jeszcze raz.

### Automatyczne wyłączenie:

Back Massager zaprojektowany jest jako urządzenie praktyczne i bezpieczne. Dlatego właśnie urządzenie zostało zaprogramowane tak, aby wyłączyć się po 30 minutach od ostatniego naciśnięcia przycisku. Aby reaktywować urządzenie należy wcisnąć jakikolwiek przycisk. Za każdym razem, kiedy zmieniana jest funkcja masażu timer jest resetowany na zero (minut). Tej funkcji nie należy mylić z funkcją stop („OFF”). Nie należy jednak zapominać o wyłączeniu urządzenia, które nie jest używane.

**Uwaga:** urządzenie posiada specjalny sensor, który rozpoznaje nacisk na urządzenie. Kiedy sensor nie odczuwa ciężaru, wyłącza funkcję podgrzewania.

Kiedy wybrana jest funkcja podgrzewania „HEAT”, intensywność masażu delikatnie się zmniejsza. To normalna sytuacja i nie powinna być przyjmowana jako oznaka problemu (urządzenia).

### Używanie w domu lub biurze:

Należy podłączyć urządzenie do gniazda zasilania 230V. Przytwierdzić Back Massager do fotela czy krzesła i relaksować się.

### Używanie w samochodzie:

Należy włączyć wtyczkę zasilania w miejsce zapalniczki.

### Utrzymanie urządzenia

**Składowanie:** Należy przechowywać masażer w opakowaniu w miejscu suchym i chłodnym. Masażer nie może mieć kontaktu z ostrymi obiektami, które mogą go uszkodzić. Aby uniknąć uszkodzenia kabla, nie należy owijać go wokół urządzenia. Nie wolno wieszyc urządzenia za kabel.

**Czyszczenie:** należy odłączyć urządzenie z sieci i ochłodzić je. Następnie wyczyścić miękką, delikatną gąbką. Nigdy nie wolno dopuścić wody lub innych płynów do kontaktu z urządzeniem. Nie wolno zanurzać urządzenia. Nie wolno używać produktów ściernych, szczotek, benzyny, parafiny, wosku, środków czyszczących do samochodów czy narzędzi do malowania.

**Nigdy nie wolno samemu naprawiać urządzenia.**

## **Gwarancja**

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupu towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanymi urządzeniami oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem, oznaczonym datą i pieczęcią punktu sprzedaży oraz dowodem zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....  
Podpis Klienta

L.p.	Data	Naprawa	Podpis i pieczęć