



DWUGŁOWICOWY STETOSKOP


INTEC ST-200

TYP RAPPAPORT



INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUDOWA SŁUCHAWKI

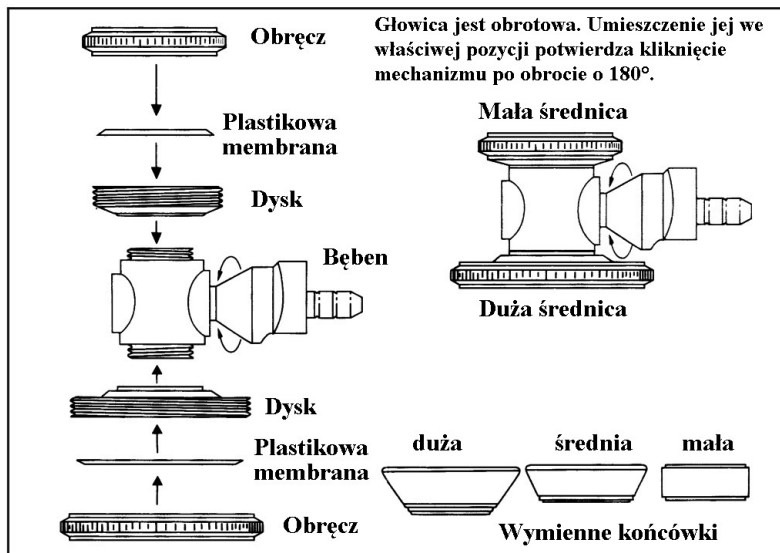

OPAKOWANIE ZAWIERA:

1. Dwustronną głowicę obrotową z małą i dużą średnicą 1 szt.
2. Chromowaną lirę zakończoną plastikowymi oliwkami dousznymi 1 szt.
3. Wężyk z grubej gumy zakończony metalowym łącznikiem 1 szt.
4. Wymienialną plastikową końcówkę w rozmiarze dla dorosłych 1 szt.
5. Wymienialną plastikową końcówkę w rozmiarze średnim 1 szt.
6. Wymienialną plastikową końcówkę w rozmiarze dla dzieci 1 szt.
7. Zapasowe oliwki douszne w małym i dużym rozmiarze 2 pary
8. Zapasowe membrany plastikowe w dużym i małym rozmiarze 2 szt.
9. Plastikowa torebka na części wymienne 1 szt.

Całe urządzenie, za wyjątkiem gumowych i plastikowych części, jest chromowane i umieszczone w przezroczystym opakowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Ten stetoskop jest dwugłowicowy i w pełni wyposażony. Składa się z dwóch końcówek głowicy o dużej i małej średnicy, które można wymienić i które zakończone są przezroczystymi membranami, chroniącymi przed wilgocią.

Należy go używać w następujący sposób:

1. Włożyć oliwki stanowiące zakończenie stetoskopu do uszu.
2. Lekko postukać opuszką palca w membranę na głowicy – pozwoli to na upewnienie się o drożności przewodów i gotowości do pracy.
3. Jeśli nic nie słychać, należy obrócić głowicę o 180° aż do kliknięcia i ponowić próbę dźwiękową.
4. Należy znaleźć ustawienie, w którym dźwięki będą słyszalne.
5. Po pomyślnej próbie dźwięku można rozpocząć badanie za pomocą stetoskopu.
6. Gdy zachodzi potrzeba wymiany którejkolwiek z końcówek, powyższe czynności należy powtórzyć, gdy końcówki zostaną zmienione.
7. Po zakończeniu badania należy wyjąć słuchawkę z uszu i zdjąć z szyi.

Zaleca się dezynfekcję stetoskopu po każdorazowym badaniu.

GWARANCJA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na końcu Instrukcji obsługi oraz na opakowaniu i etykiecie urządzenia) gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja ta obowiązuje w kraju, w którym zakupiono produkt w obrębie Unii Europejskiej.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionej rzeczy, tj. wady materiału oraz wady powstałe w procesie produkcji.
4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczególności wynikłych z normalnego użytkowania rzeczy.
5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych użytkowaniem niewłaściwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wynikłych ze zdarzeń losowych, użycia niedozwolonych akcesoriów, zmian dokonanych na urządzeniu, ani żadnego innego zdarzenia, które znajduje się poza kontrolą firmy WEGA Handel GmbH.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
7. Podobnie prawa konsumenta wynikające z lokalnych przepisów danego kraju sprzedaży nie są ograniczone przez tę gwarancję.



WEGA Handel GmbH

Herbert-Jensch-Str. 111

15234 Frankfurt (Oder), Niemcy

www.wegahandel.com

Dystrybutor w Polsce:

Intec Medical Sp. z o.o.

ul. L. Podbiłęty 7

31-980 Kraków

www.intecmedical.pl

KARTA GWARANCYJNA

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

Dane kupującego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Tel.:

e-mail:

Warunki gwarancji:

1. Firma Intec Medical Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Krakowie udziela gwarancji co do jakości dystrybuowanego przez siebie urządzenia (zwanego dalej Sprzętem).
2. Gwarant zapewnia, że Sprzęt jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
4. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie.
6. Gwarancja udzielona na Sprzęt wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji Sprzętu.
7. Zgłoszenia reklamacji Sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu, bądź też bezpośrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
8. Reklamowany Sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub też bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
9. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzętu do serwisu Gwaranta.
10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant.
11. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie Uprawnionego, natomiast wadliwy Sprzęt lub jego części wymienione w trakcie naprawy, przechodzą w posiadanie Gwaranta.
12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
13. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny. Do naprawy przyjmowany jest tylko czysty i suchy Sprzęt.
14. Wraz ze Sprzętem w ramach reklamacji należy składać: prawidłowo wypełnioną Kartę gwarancyjną; dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury (w przypadku braku pieczęci sklepu i daty zakupu); czytelny i dokładny opis usterki wraz z opisem jej powstania i zaobserwowania; dane Uprawnionego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.
15. Karta gwarancyjna bez czytelnego podpisu Uprawnionego poświadczającego przyjęcie warunków gwarancji jest nieważna.
16. W sprawach nieregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je

.....
Podpis kupującego

Adres serwisu centralnego:
Intec Medical Sp. z o.o.
ul. L. Podbipięty 7, 31-980 Kraków
tel.: 12 376 81 15; fax: 12 398 37 11
serwis@intecmedical.pl
www.intecmedical .pl