



# JEDNOGŁOWICOWY STETOSKOP

## INTEC ST-100



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ZASTOSOWANIE

Użyteczny osłuchowy instrument diagnostyczny do rejestracji różnych dźwięków serca, płuc oraz innych organów.

## CECHY STRUKTURALNE

Stetoskopy różnią się między sobą różnym przenoszeniem dźwięku. Dwuuszna lira wykonana jest z bezszwowych rurek mosiężnych. Wysokiej jakości sprężyna dospawana do liry zapewnia dobrą elastyczność i doskonałe dopasowanie. Gładkie plastikowe oliwki są odpowiednio wyprofilowane do wygodnego zastosowania. Przewód z grubymi ściankami z PCV jest trwały i odporny na hałas zewnętrzny. Wszystkie części metalowe zostały pokryte powłoką niklowo-chromową. Atutem stetoskopu jest jego poręczność i dobra słyszalność.



## SPOSÓB UŻYCIA

Stetoskopu należy używać w następujący sposób:

1. Włożyć oliwki stanowiące zakończenie stetoskopu do uszu.
2. Lekko postukać opuszką palca w membranę na główicy – pozwoli to na upewnienie się o drożności przewodów i gotowości do pracy.
3. Po pomyślnej próbie dźwięku można rozpocząć badanie za pomocą stetoskopu.
4. Po zakończeniu badania należy wyjąć słuchawki z uszu i zdjąć z szyi.

Zaleca się dezynfekcję stetoskopu po każdorazowym badaniu.

## **GWARANCJA**

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na końcu Instrukcji obsługi oraz na opakowaniu i etykiecie urządzenia) gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja ta obowiązuje w kraju, w którym zakupiono produkt w obrębie Unii Europejskiej.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionej rzeczy, tj. wady materiału oraz wady powstałe w procesie produkcji.
4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczególności wynikłych z normalnego użytkowania rzeczy.
5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych użytkowaniem niewłaściwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wynikłych ze zdarzeń losowych, użycia niedozwolonych akcesoriów, zmian dokonanych na urządzeniu, ani żadnego innego zdarzenia, które znajduje się poza kontrolą firmy WEGA Handel GmbH.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
7. Podobnie prawa konsumenta wynikające z lokalnych przepisów danego kraju sprzedaży nie są ograniczone przez tę gwarancję.



**WEGA Handel GmbH**

Herbert-Jensch-Str. 111

15234 Frankfurt (Oder), Niemcy

[www.wegahandel.com](http://www.wegahandel.com)

### **Dystrybutor w Polsce:**

Intec Medical Sp. z o.o.

ul. L. Podbięty 7

31-980 Kraków

[www.intecmedical.pl](http://www.intecmedical.pl)

# KARTA GWARANCYJNA

**Pieczętka i podpis sprzedawcy:**

**Dane kupującego:**

Imię i Nazwisko: .....

Adres: .....

Tel.: .....

e-mail: .....

## **Warunki gwarancji:**

1. Firma Intec Medical Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Krakowie udziela gwarancji co do jakości dystrybuowanego przez siebie urządzenia (zwanego dalej Sprzętem).
2. Gwarant zapewnia, że Sprzęt jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
4. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie.
6. Gwarancja udzielona na Sprzęt wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji Sprzętu.
7. Zgłoszenia reklamacji Sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu, bądź też bezpośrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
8. Reklamowany Sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub też bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
9. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzętu do serwisu Gwaranta.
10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant.
11. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie Uprawnionego, natomiast wadliwy Sprzęt lub jego części wymienione w trakcie naprawy, przechodzą w posiadanie Gwaranta.
12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
13. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny. Do naprawy przyjmowany jest tylko czysty i suchy Sprzęt.
14. Wraz ze Sprzętem w ramach reklamacji należy składać: prawidłowo wypełnioną Kartę gwarancyjną; dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury (w przypadku braku pieczęci sklepu i daty zakupu); czytelny i dokładny opis usterki wraz z opisem jej powstania i zaobserwowania; dane Uprawnionego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.
15. Karta gwarancyjna bez czytelnego podpisu Uprawnionego poświadczającego przyjęcie warunków gwarancji jest nieważna.
16. W sprawach nieregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je

.....  
Podpis kupującego

Adres serwisu centralnego:  
Intec Medical Sp. z o.o.  
ul. L. Podbipięty 7, 31-980 Kraków  
tel.: 12 376 81 15; fax: 12 398 37 11  
serwis@intecmedical.pl  
www.intecmedical .pl